

# HANDLEIDING

## vaste aansluiting op kraan en directe afvoer



### Eindelijk! lekker douchen op bed

Geen extra prikkels voor cliënten, geen tillift nodig!

Cliënt kan gewoon op bed blijven liggen!

Heerlijk ontspannen douchen op bed!

#### Complete Bedoumat splash beddouche bestaat uit:

- Douchemat met integreerde afvoer
- Douchekop met slang 8 m lang
- 10 Klemmen
- 50 m plastic tube folie (afvoerfolie) kan op maat geknipt worden
- 1 Koffer box blauw

## VOORBEREIDING


- 1** Bevestig eerst de plastic tube folie aan de afvoer van de Bedoumat. De folie door de wartel halen en goed aan de afvoer schroeven. De tube folie moet zo lang zijn dat deze tot het afvoerputje in de douche komt. Deze folie elke keer vernieuwen.



- 2** Leg meerdere handdoeken klaar, ook shampoo en douchegel . Zet een wasmand naast het bed om de natte handdoeken en de Bedoumat na het douchen in te leggen.




- 
- 3** Bestaande douchslang van de douchekraan afhalen, nieuwe lange doucheslang op de douchekraan draaien.

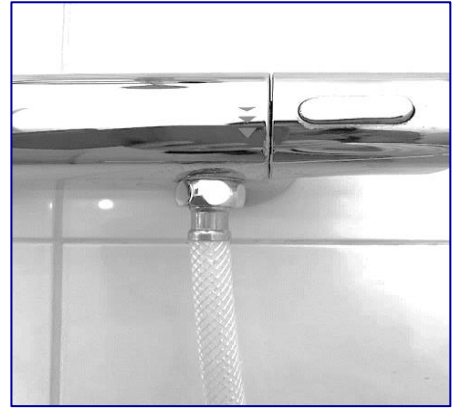

- 
- 4** Eerst testen of het water goed weg loopt. Zorg dat de tube folie, (afvoerslang) niet gedraaid is.

Zodat het water goed door kan lopen en niet belemmerd wordt doordat de tube folie gedraaid of geknikt op de vloer ligt.

De temperatuur testen, de kraan niet al te hard aanzetten.

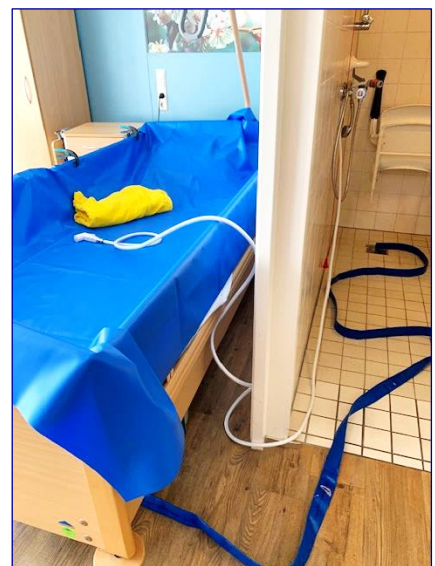

---

## GEBRUIK

- 
- 5** Zorg ervoor dat de afvoer met tube folie, goed onder bij het voeteneinde zit, in het midden van het bed. De afvoer tussen het bed en de matras naar beneden duwen. Zorg dat de folie niet gedraaid is en direct naar beneden gaat, zodat het water goed weg loopt. Evt. matras met cliënt naar het hoofdeinde toe opschuiven, om ruimte te krijgen aan het voeteneinde.



6

Rol de Bedoumat op, zie afbeelding. De cliënt nog niet uitkleden.  
Hoofdkussen in het bed laten zitten, zo dat de cliënt comfortabel in het bed ligt. De mat over het kussen heen rollen.



7

Rol de mat onder de cliënt, door de cliënt eerst naar achteren op zijn/haar zij te leggen.

Zorg dat de cliënt goed boven in het bed ligt.

Vervolgens de mat tegen de rug aan rollen en de cliënt terug op de mat plaatsen, net als bij een laken verschonen.



8

Bevestig de Bedoumat met klemmen aan de bedhekken en aan het hoofd- en voeteneinde.

Gebruik altijd badhanddoeken om de cliënt voor en naar het douchen toe te dekken.



9

Het bed iets schuin zetten, zodat het water naar het voeteneinde toe afloopt.

**Het bed moet een Trendelenburg functie hebben.**



10 **Bed op de rem zetten!**

**Controleer af een toe of het water goed weg loopt!**

**Het water eerst goed laten doorlopen tot het water op goede temperatuur is! Ook direct de afvoer controleren of het water goed weg loopt.**

**Bekijk demo video op: [www.bedoumat.nl](http://www.bedoumat.nl)**

- 
- 11** Na het douchen de cliënt afdrogen, de mat van de andere kant af terugrollen, eventueel restwater op de mat met handdoek opdeppen. Tube folie los maken van de mat. Zorg dat het water naar het doucheputje toe wegl loopt.

Mat in de wasmand leggen.  
Cliënt aankleden en verzorgen.



- 
- 12** Bedoumat schoon maken, en laten drogen. De mat kan met de klemmen aan een kledinghaak opgehangen worden om te laten drogen.

Door de doucheslang hoog te houden en de hendel in te drukken, loopt het restwater uit de slang.



Beddouche met vaste aansluiting op douchekraan  
compl. in koffer box  
5 kg



Beddouche mobiel  
compl. in koffer box  
8,5 kg

---

**Wij komen graag bij u een demonstratie geven!**

Lofré  
Lony van Westing-Freidig  
IJsselstein  
Tel. + 31 (0) 6 38 33 45 36

info@lofre.nl  
www.bedoumat.nl