

HANDLEIDING

mobile kamerdouche



Eindelijk! lekker douchen op bed

Geen extra prikkels voor cliënten, geen tillift nodig!

Cliënt kan gewoon op bed blijven liggen!

Heerlijk ontspannen douchen!

Complete Bedoumat splash beddouche bestaat uit:

- Douchemat met integreerde afvoer
- 12 V Trafo incl. kabel, douchekop met slang , pomp en stroomaansluiting
- Blauw koffertje
- Jerrycan 16 L/19L
- 10 Klemmen
- 25 m plastic tube folie
- 1 Koffer box blauw groot
- Zelf zorgen voor grote emmer ca 22 L

VOORBEREIDING

1

Bevestig eerst +/- 60 cm plastic tube folie aan de afvoer van de Bedoumat splash. De folie door de wartel halen en goed aan de afvoer schroeven. Deze folie elke keer vernieuwen.



2

Leg meerdere handdoeken klaar. Zet een wasmand naast het bed om de natte handdoeken en de Bedoumat splash na het douchen in te leggen. Zet ook een grote emmer klaar.



-
- 3** Vul de Jerrycan met warm water, ca. 38-39 graden

-
- 4** Schroef de pomp met deksel en stroomaansluiting op de jerrycan. Zorg dat de pomp diep in de jerrycan zit. (voorkomt vacuüm zuigen) Zorg dat de schakelaar uit staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg ervoor dat de trafo ca. 2 à 3 m van het bed af staat. Op de trafo is ook nog een schakelaar.




GEBRUIK

-
- 5** Rol de Bedomat splash op, zie afbeelding. De patiënt nog niet uitkleden.

Hoofdkussens in het bed laten zitten. De mat over het kussen heen rollen.



-
- 6** Zorg ervoor dat de afvoer met tube folie, goed onder bij het voeteneinde zit, in het midden van het bed. De afvoer tussen het bed en de matras naar beneden duwen. Zorg dat de folie niet gedraaid is, zodat het water goed weg loopt.

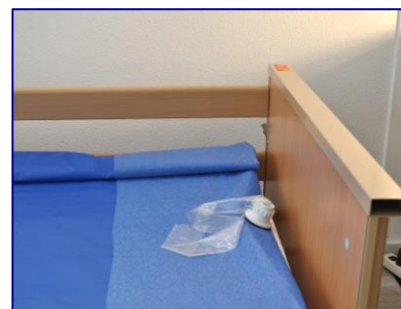

-
- 7** Rol de mat onder de patiënt, door de patiënt eerst naar achteren op zijn/haar zij te leggen.
Zorg dat de patiënt goed boven in het bed ligt.
Vervolgens de mat tegen de rug aan rollen en de patiënt terug op de mat plaatsen, net als bij een laken verschonen.




-
- 8** Bevestig de Bedomat splash met klemmen aan de beddekken en aan het hoofd- en voeteneinde.

Gebruik altijd badhanddoeken om de patiënten voor en na het douchen toe te dekken.



-
- 9** Emmer onder de afvoer zetten.
Zorg dat de folie in de emmer hangt.
Controleer af een toe of het water goed weg loopt en of de emmer niet overstroomd.

Bed op de rem zetten!

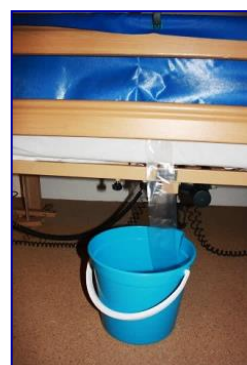

-
- 10** Het bed iets schuin zetten, zodat het water naar het voeteneinde toe loopt.

Het bed moet een Trendelenburg functie hebben.



-
- 11** Na het douchen de patiënt afdrogen, de mat van de andere kant af terugrollen, eventueel restwater op de mat met handdoek opdeppen.

Mat in de wasmand leggen.
Patiënt aankleden en verzorgen.



12

Bedoumat splash schoon maken,
en laten drogen.
De mat kan met de klemmen aan
een kledinghaak opgehangen
worden.
Door de doucheslang hoog te
houden en de hendel in te drukken,
loopt het restwater uit de slang en
de pomp.



Beddouche mobiel
complet in koffer box
8,5 kg



Beddouche met vaste
aansluiting op
douchekraan.
complet in koffer box



Kamerdouche mobiel
kan overal opgezet worden

Wij komen graag bij u een demonstratie geven!

Lofré
Lony van Westing-Freidig
IJsselstein
Tel. + 31 (0) 6 38 33 45 36

info@lofre.nl
www.bedoumat.nl